



ORTHOPUS SUPPORTER

HURTIGGUIDE

BAKKNAPP FARGER



DVALE MODUS = BLINKENDE HVIT

2 KORTE KLIKK på bakkappen for å gå tilbake til DVALE modus

SKIFTE MODUS

1 LANGT KLIKK på begge knapper på kontrollpanelet
ELLER
1 KORT KLIKK på bakkappen
Kort vibrasjon = OK

STASJONÆR MODUS = BLÅ

Låses i valgt posisjon/høyde

+ opp - ned

SETTING SWING LIMITS

1 LANGT KLIKK → **1** → Sett **øvre** svinggrense → **2** → Sett **nedre** svinggrense → **3** → Tilbake i **STASJONÆR** modus

↓
Posisjoner enheten der du ønsker å sette grensen med kontrollpanelet.

For å **FASTSETTE**, **1 LANGT KLIKK**
Lang vibrasjon = OK

For å hoppe over **UTEN** å sette grenser, **1 KORT KLIKK**

FRI MODUS = GRØNN

Blir med på bevegelsene

+ **+100g /klikk** - **-100g /klikk**

JUSTER EN IDEELL KOMPENSASJONSKRAFT

1 LANGT KLIKK på bakkappen
Kort vibrasjon = OK

PARKERINGSPOSISJON PÅ RULLESTOL

I **STASJONÆR** modus, skyv ORTHOPUS Supporter ned på armlenet, og enheten blir værende i posisjonen.



Bakknappen
blinkende blå

Parkeringsposisjon aktivert = OK

For å forlate parkeringsposisjon, klikk på + knappen på kontrollpanelet.

SIKKERHET I FRI MODUS



Bakknappen
blinker grønt

Hvis enheten settes i FRI modus uten armen i armortosen, vil enheten selv sette seg i sikkerhetsmodus.

VARSELLAMPE



KOBLE ENHETEN FRA STRØM, og vent noen minutter før du tar den i bruk igjen. Dersom varsellampen (rød) vedvarer, vennligst kontakt leverandør. .

ANBEFALINGER

i Ved oppstart av ORTHOPUS Supporter, ikke rør kontrollpanelet og ikke legg armen i armortosen.

i Før brukerens arm fjernes fra støtten, tilse alltid at ORTHOPUS Supporter er i STASJONÆR eller DVALE modus.

i Det anbefales at brukeren **akklimeres til enheten gradvis**, og følges opp av kvalifisert helsepersonell i oppstartsperioden.

i Kun en **person med opplæring** er autorisert til å installere ORTHOPUS Supporter.

For å utnytte alle fordelene ORTHOPUS Supporter tilbyr, **vennligst tilse at:**

✓ Armen er i horisontal posisjon, og ikke heller fremover eller bakover.

✓ Armen alltid er i kontakt med albuestøtten. Hvis nødvendig, sett en øvre svinggrense.

✓ Ved innstallasjon på rullestol er kabel og boksgrensesnitt beskyttet fra regn og fukt.

ADVARSEL

⊖ ORTHOPUS Supporter er **designet eksklusivt for å støtte armen**: den skal ikke benyttes som hjelpemiddel for å reise eller sette seg, eller for andre formål enn tiltenkt.

⊖ Ved feil eller skadede elektroniske komponenter, **vennligst ikke bruk enheten**. Vennligst kontakt leverandør i ditt land for ved feil eller mangler..

⚠ Ikke plasser enheten i direkte sollys eller nær en varmekilde for en lengre periode.

⚠ **Enheten er vannresistent, men ikke vanntett**. Ikke utsett enheten for kraftig regn eller svært høy luftfuktighet.



Hvis ORTHOPUS Supporter ikke er montert, **må den oppgaves i originalforpakning og boks til enhver tid**. Ved retur må enheten returneres i originalforpakning.



Vennligst sett deg inn i ORTHOPUS Supporter User manual on orthopus.com/en/documentation



ORTHOPUS Supporter Hurtigguide
v1.1 - 2023/03/10