


ORTHOPUS SUPPORTER

KURZANLEITUNG

FARBEN DES KNOPFES AUF DER RÜCKSEITE

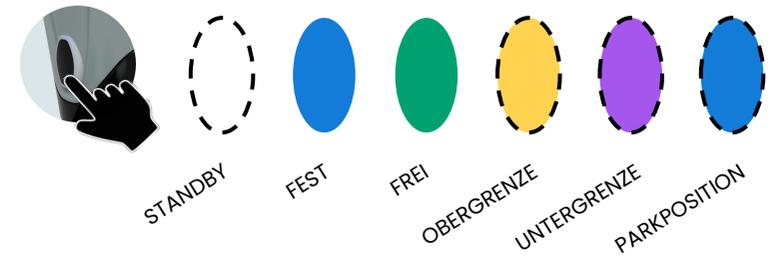

Anleitungsvideos



FESTER MODUS = BLAU
Fixiert eine gewünschte Höhe

+ Hoch  **- Runter**

SPEICHERUNG DER OBER- ODER UNTERGRENZEN

1 LANGER KLICK → **1** →  → **2** →  → **3** → 

Einstellung einer **Obergrenze** Einstellung einer **Untergrenze** Rückkehr in den **FESTEN** Modus

↓ ↓

 Die Ausstattung mit der Fernbedienung in die gewünschte Position bringen

 Zum **SPEICHERN: 1 LANGER KLICK**
Lange Vibration = **OK**

OHNE Speicherung fortfahren:
1 KURZER KLICK

UM MODUS ZU ÄNDERN

-  **LANGER KLICK** auf die beiden Tasten der Fernbedienung
- ODER
-  **1 KURZER KLICK** auf den hinteren Knopf
Kurze vibration = **OK**

FREIER MODUS = GRÜN
Begleitet die Bewegungen

+ +100g /klick  **- -100g /klick**

SPEICHERUNG EINER UNTERSTÜTZENDEN KRAFT

 **1 LANGER KLICK** auf den hinteren Knopf
Kurze vibration = **OK**

STANDBY

= WEISS BLINKEND

2 KURZE KLICKS auf den hinteren Knopf, um in den STANDBY-Modus zurückzukehren



PARKPOSITION BEI EINEM ROLLSTUHL

Fahren Sie im **FESTEN Modus** solange runter, bis der ORTHOPUS Supporter auf die Armlehne drückt und blockiert.



Blaues Blinken
des hinteren Knopfes
Aktivierte Parkposition = OK

Zum Verlassen der Parkposition drücken Sie die Taste **+** auf der Fernbedienung.

SICHERHEIT IM FREIEN MODUS



Grünes Blinken
des hinteren Knopfes

Im **FREIEN Modus**, wenn sich kein Arm in der Orthese befindet, wechselt der ORTHOPUS Supporter in die Sicherheitsstellung.

ROTES BLINKEN



Klemmen Sie die Ausstattung ab, warten Sie einige Minuten und schalten Sie sie erneut ein.
Bleibt der hintere Knopf rot, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur medizinischer Geräte.

NUTZUNGSHINWEISE

i Der ORTHOPUS Supporter muss eingeschaltet werden, **ohne** dass sich der Arm in der Orthese befindet und ohne Betätigung der Fernbedienung.

i Vor dem Entfernen des Arms des Nutzers aus der Ausstattung müssen Sie **immer sicherstellen**, dass sich der ORTHOPUS Supporter im Modus FEST oder STANDBY befindet.

i Es wird empfohlen, die **Ausstattung schrittweise einzusetzen** und sich von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft betreuen zu lassen.

i Nur **eine geschulte Person** darf die Ausstattung einrichten.

Zur uneingeschränkten Nutzung der Funktionen des ORTHOPUS Supporter sollten Sie **auf Folgendes achten**:

✓ In der horizontalen Position ist der Arm weder nach vorne noch nach hinten geneigt.

✓ Der Arm ist stets mit der Ellbogenstütze in Kontakt. Speichern Sie bei Bedarf eine Höhenbeschränkung.

✓ Bei der Verwendung mit einem Rollstuhl müssen die Kabel und das Netzteil sorgfältig auf der Rückseite und vor Regen geschützt aufbewahrt werden.

ZU BEACHTENDE PUNKTE

⊖ Der ORTHOPUS Supporter ist **ausschließlich für das Stützen des Arms vorgesehen** und darf nicht als Unterstützung beim Aufstehen, Hinsetzen oder für andere Zwecke verwendet werden.

⊖ Bei Defekten oder Beschädigungen an den elektronischen Komponenten dürfen Sie das Gerät nicht verwenden. Bei Problemen bezüglich der Wartung **wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur für medizinische Geräte**.

⚠ Das Gerät darf nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder sich in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle befinden.

⚠ Das Gerät ist zwar spritzwassergeschützt, jedoch **nicht wasserdicht**. Es darf keinem anhaltenden Regen oder hoher Umgebungsfeuchtigkeit ausgesetzt werden.



Wenn der ORTHOPUS Supporter nicht verwendet wird, muss er stets **in seinem Verpackungskarton aufbewahrt werden**. Diese Verpackung muss im Falle einer Rücksendung der Ausstattung verwendet werden.



Die **Bedienungsanleitung** der Ausstattung finden Sie auf:
<http://orthopus.com/documentation>



Kurzanleitung für den ORTHOPUS Supporter
v1.1 - 2023/03/10