


ORTHOPUS SUPPORTER

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

COULEURS DU BOUTON ARRIÈRE

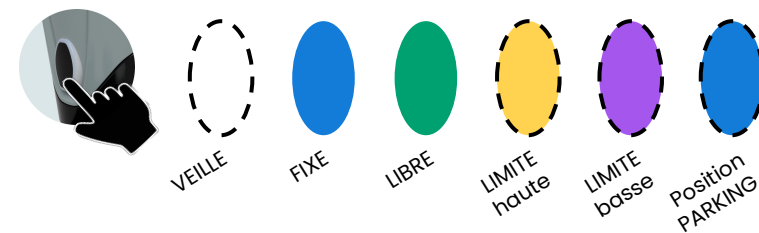

Tutos vidéos



MODE FIXE = BLEU
Stabilise une hauteur choisie

+ monter - descendre

ENREGISTRER DES LIMITES HAUTES OU BASSES

1 CLIC LONG → 1 → Configurer une limite haute → 2 → Configurer une limite basse → 3 → Retour en mode FIXE

Placez le dispositif à la position souhaitée avec la télécommande

Pour **ENREGISTRER**, 1 CLIC LONG
Vibration longue = OK

Pour passer **SANS enregistrer**, 1 CLIC COURT

VEILLE
= BLANC
CLIGNOTANT

2 CLICS COURTS sur le bouton arrière pour revenir en mode VEILLE

CHANGER DE MODE

CLIC LONG sur les 2 boutons de la télécommande
OU
1 CLIC COURT sur le bouton arrière
Vibration courte = OK

MODE LIBRE = VERT
Accompagne les mouvements

+100g / clic -100g / clic

ENREGISTRER UNE FORCE DE SOUTIEN

1 CLIC LONG sur le bouton arrière
Vibration courte = OK

POSITION PARKING SUR FAUTEUIL

En **mode FIXE**, descendre jusqu'à ce que l'ORTHOPUS Supporter appuie sur l'accoudoir et se bloque.



Clignotement bleu
du bouton arrière

Position parking activée = OK

Pour sortir de la position Parking, appuyez sur le bouton **+** de la télécommande.

SÉCURITÉ EN MODE LIBRE



Clignotement vert
du bouton arrière

En mode LIBRE s'il n'y a pas de bras installé dans l'orthèse, l'ORTHOPUS Supporter se met en sécurité.

CLIGNOTANT ROUGE



Débranchez le dispositif, attendez quelques minutes puis rallumez-le. Si le bouton arrière reste rouge, contactez votre installateur de matériel médical.

CONSEILS D'UTILISATION

i L'ORTHOPUS Supporter doit être allumé **sans** bras installé dans l'orthèse et sans toucher à la télécommande.

i Avant de retirer le bras de l'utilisateur du support, **vérifiez toujours** que l'ORTHOPUS Supporter est en mode FIXE ou en VEILLE.

i Il est conseillé d'**utiliser le dispositif de manière progressive** et d'être suivi par un professionnel de santé.

i Seule **une personne formée** est habilitée à installer le dispositif.

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de l'ORTHOPUS Supporter, **veillez à ce que :**

✓ En position horizontale, le bras ne penche ni en avant ni en arrière.

✓ Le bras soit toujours en contact avec le support de coude. Si nécessaire, enregistrez une limite en hauteur.

✓ En utilisation sur fauteuil, les câbles et le boîtier d'alimentation soient bien rangés à l'arrière et à l'abri de la pluie.

POINTS DE VIGILANCE

⊖ L'ORTHOPUS Supporter est **uniquement destiné à soutenir le bras** : il ne doit pas servir d'appui pour se lever, s'asseoir ou pour tout autre usage.

⊖ En cas de défauts ou dommages sur les éléments électroniques, n'utilisez pas l'appareil. **Contactez votre installateur de matériel médical** pour tout problème de maintenance.

⚠ Ne placez pas le dispositif en plein soleil ou à proximité directe d'une source de chaleur de manière prolongée.

⚠ Le dispositif est résistant aux projections d'eau mais n'est **pas étanche**. Ne pas l'exposer à une pluie soutenue ou à une forte humidité ambiante.



L'ORTHOPUS Supporter doit toujours **être rangé dans son carton d'emballage** lorsqu'il n'est pas installé. Cet emballage devra être utilisé en cas de renvoi du dispositif.



Vous pouvez consulter le **manuel d'utilisation** du dispositif sur orthopus.com/fr/documentation



Guide d'utilisation rapide de l'ORTHOPUS Supporter
v1.1 - 2023/03/10