



ORTHOPUS SUPPORTER

SNELLE GEBRUIKSAANWIJZING

KLEUREN VAN DE ACHTERSTE KNOP

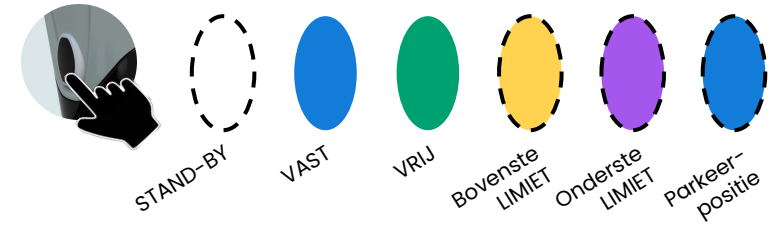

Instructievideo's

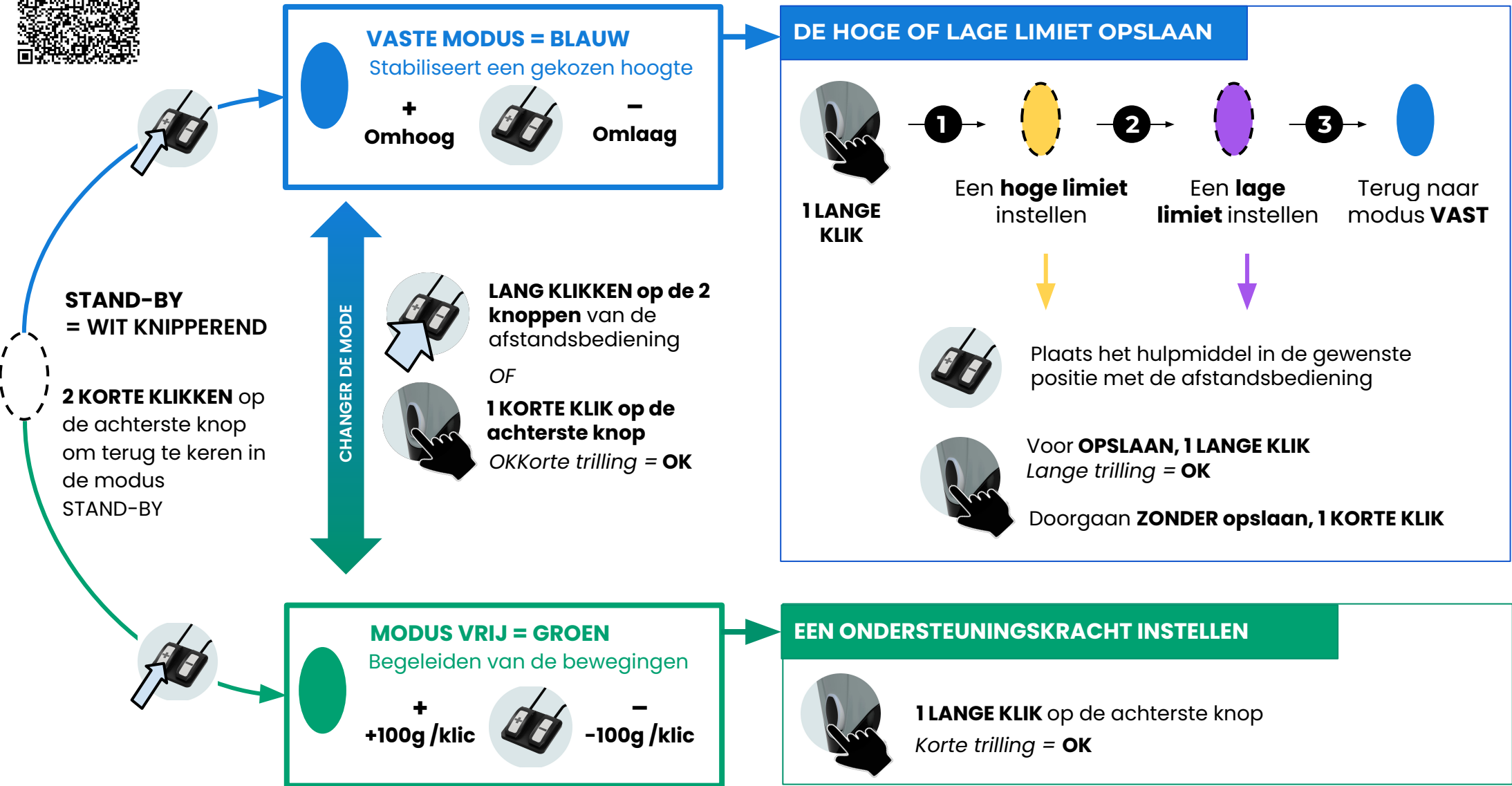

PARKEERPOSITIE OP STOEL

Breng in de **modus VAST** omlaag totdat de ORTHOPUS Supporter op de armsteun rust en wordt geblokkeerd.



Blauw knipperen

van de achterste knop

Parkeerpositie geactiveerd = **OK**

Om uit de Parkeerpositie te komen, drukt u op de knop **+** van de afstandsbediening.

VEILIGHEID IN DE MODUS VRIJ



Groen knipperen

van de achterste knop

Als er in de modus VRIJ geen arm in de orthese is geplaatst, wordt de ORTHOPUS Supporter in de veiligheidsstand gezet.

ROOD KNIPPEREND



Koppel het hulpmiddel los, wacht een aantal minuten en zet het dan weer aan.

Als de achterste knop rood blijft, neemt u contact op met de installateur van medische hulpmiddelen.

GEBRUIKSTIPS

i De ORTHOPUS Supporter moet worden aangesloten **zonder** dat er een arm in de orthese is geplaatst en zonder de afstandsbediening aan te raken.

i Voor het verwijderen van de arm van de gebruiker uit het hulpmiddel, **altijd controleren** of de ORTHOPUS Supporter in de modus VAST of STAND-BY staat.

i Het wordt aangeraden om **het hulpmiddel steeds iets langer te gebruiken** en te worden bijgestaan door een gekwalificeerde zorgverlener.

i Het hulpmiddel mag alleen worden geïnstalleerd door een **opgeleide persoon**.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de functies van de ORTHOPUS Supporter, **ervoor zorgen dat:**

✓ De arm in horizontale positie niet naar voren of naar achteren leunt.

✓ De arm altijd in contact is met de elleboogsteun. Indien nodig, een hoogtelimiet instellen.

✓ Bij gebruik op een stoel, de kabels en de voedingskast achterop en beschermd tegen regen zijn opgeborgen.

AANDACHTSPUNTEN

⊖ De ORTHOPUS Supporter is **uitsluitend bedoeld voor het ondersteunen van de arm**: hij mag niet worden gebruikt als steunpunt voor het opstaan, gaan zitten of voor ander gebruik.

⊖ In geval van fouten of schade aan elektronische elementen, het apparaat niet gebruiken. **Neem contact op met uw medische specialzaak** voor alle onderhoudsproblemen.

⚠ Plaats het hulpmiddel niet langdurig in de volle zon of in de directe omgeving van een warmtebron.

⚠ Het hulpmiddel is bestand tegen waterstralen maar is **niet waterdicht**. Stel het niet bloot aan langdurige regen of een hoge luchtvochtigheid.



De ORTHOPUS Supporter moet altijd worden **opgeborgen in zijn verpakkingsdoos** als hij niet geïnstalleerd is. Deze verpakking moet worden gebruikt voor het terugsturen van het hulpmiddel.



U kunt de **gebruiksaanwijzing** van het hulpmiddel raadplegen op <http://orthopus.com/documentation>



Snelle gebruiksaanwijzing van de ORTHOPUS Supporter
v1.1 - 2023/03/10