

# ORTHOPUS SUPPORTER

## HURTIGGUIDE

### BAKKNAPP FARGER



### Instruksjonsvideoer



### DVALE MODUS = BLINKENDE HVIT

**2 KORTE KLIKK**  
på bakkappen for  
å gå tilbake til  
DVALE modus

### STASJONÆR MODUS = BLÅ

Låses i valgt posisjon/høyde

**+ opp**  **- ned**

SKIFTE MODUS

 **1 LANGT KLIKK** på begge  
knapper på  
kontrollpanelet

ELLER

 **1 KORT KLIKK** på  
bakkappen  
*Kort vibrasjon = OK*

### FRI MODUS = GRØNN


Blir med på bevegelsene

**+ +100g /klikk**  **- -100g /klikk**


### SETTING SWING LIMITS




**1 LANGT  
KLIKK**

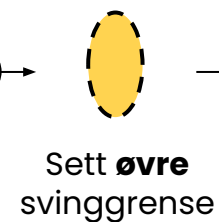


Sett **øvre**  
svinggrense

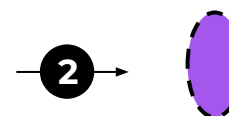

Sett **nedre**  
svinggrense

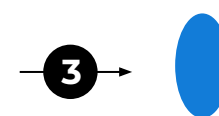

Tilbake i  
**STASJONÆR**  
modus

 Posisjoner enheten der du ønsker å sette  
grensen med kontrollpanelet.

For å **FASTSETTE**, **1 LANGT KLIKK**  
*Lang vibrasjon = OK*

For å hoppe over **UTEN** å sette grenser, **1  
KORT KLIKK**

### JUSTER EN IDEELL KOMPENSASJONSKRAFT



**1 LANGT KLIKK** på bakkappen  
*Kort vibrasjon = OK*

## PARKERINGSPOSISJON PÅ RULLESTOL

I **STASJONÆR** modus, skyv ORTHOPUS Supporter ned på armlenet, og enheten blir værende i posisjonen.



Bakknappen  
**blinkende blå**

Parkeringsposisjon aktivert = **OK**

For å forlate parkeringsposisjon, klikk på **+** knappen på kontrollpanelet.

## SIKKERHET I FRI MODUS



Bakknappen  
**blinker grønt**

Hvis enheten settes i FRI modus uten armen i armortosen, vil enheten selv sette seg i sikkerhetsmodus.

## VARSELLAMPE



**KOBLE ENHETEN FRA STRØM**, og vent noen minutter før du tar den i bruk igjen. Dersom varsellampen (rød) vedvarer, vennligst kontakt leverandør. .

## ANBEFALINGER

**i** Ved oppstart av ORTHOPUS Supporter, ikke rør kontrollpanelet og ikke legg armen i armortosen.

**i** Før brukerens arm fjernes fra støtten, tilse alltid at ORTHOPUS Supporter er i STASJONÆR eller DVALE modus.

**i** Det anbefales at brukeren **akklimatiseres til enheten gradvis**, og følges opp av kvalifisert helsepersonell i oppstartsperioden.

**i** Kun en **person med opplæring** er autorisert til å installere ORTHOPUS Supporter.

For å utnytte alle fordelene ORTHOPUS Supporter tilbyr, **vennligst tilse at:**

✓ Armen er i horisontal posisjon, og ikke heller fremover eller bakover.

✓ Armen alltid er i kontakt med albuestøtten. Hvis nødvendig, sett en øvre svinggrense.

✓ Ved innstallasjon på rullestol er kabel og boksgrensesnitt beskyttet fra regn og fukt.

## ADVARSEL

⊖ ORTHOPUS Supporter er **designet eksklusivt for å støtte armen**: den skal ikke benyttes som hjelpemiddel for å reise- eller sette seg, eller for andre formål enn tiltenkt.

⊖ Ved feil eller skadede elektroniske komponenter, **vennligst ikke bruk enheten**. Vennligst kontakt leverandør i ditt land for ved feil eller mangler..

⚠ Ikke plasser enheten i direkte sollys eller nær en varmekilde for en lengre periode.

⚠ **Enheten er vannresistent, men ikke vantett**. Ikke utsett enheten for kraftig regn eller svært høy luftfuktighet.



Hvis ORTHOPUS Supporter ikke er montert, **må den oppgaves i originalforpakning og boks til enhver tid**. Ved retur må enheten returneres i originalforpakning.



Vennligst sett deg inn i ORTHOPUS Supporter User manual on [orthopus.com/documentation](https://orthopus.com/documentation)



ORTHOPUS Supporter Hurtigguide  
v1.1 - 2023/03/10