


# ORTHOPUS SUPPORTER

## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

### COULEURS DU BOUTON ARRIÈRE

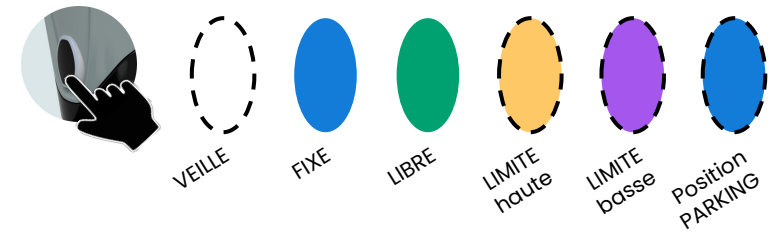

Tutos vidéos



### MODE FIXE = BLEU

Stabilise une hauteur choisie

-  
descendre



+  
monter

### ENREGISTRER DES LIMITES HAUTES OU BASSES



1 CLIC LONG

1



Configurer une  
**limite haute**

2



Configurer une  
**limite basse**

3



Retour en  
mode **FIXE**

**VEILLE**  
= BLANC  
CLIGNOTANT

**2 CLICS COURTS** sur  
le bouton arrière  
pour revenir en  
mode VEILLE

CHANGER DE MODE



**CLIC LONG** sur les 2  
boutons de la  
télécommande

OU



**1 CLIC COURT** sur le  
bouton arrière

Vibration courte = **OK**

Placez le dispositif à la position  
souhaitée avec la télécommande

Pour **ENREGISTRER**, 1 CLIC LONG  
Vibration longue = **OK**

Pour passer **SANS enregistrer**, 1 CLIC COURT



### MODE LIBRE = VERT

Accompagne les mouvements

-  
-100g / clic



+  
+100g / clic

### ENREGISTRER UNE FORCE DE SOUTIEN



**1 CLIC LONG** sur le bouton arrière  
Vibration courte = **OK**

## POSITION PARKING SUR FAUTEUIL

En **mode FIXE**, descendre jusqu'à ce que l'ORTHOPUS Supporter appuie sur l'accoudeur et se bloque.



**Clignotement bleu**  
du bouton arrière

*Position parking activée = OK*

Pour sortir de la position Parking, appuyez sur le bouton **+** de la télécommande.

## ATTENTE MODE LIBRE



**Clignotement vert**  
du bouton arrière

En mode LIBRE s'il n'y a pas de bras installé dans l'orthèse, l'ORTHOPUS Supporter se met en attente.

## MODE ERREUR



**Débranchez le dispositif**, attendez quelques minutes puis rallumez-le. Si le bouton arrière reste rouge, contactez votre installateur de matériel médical.

## CONSEILS D'UTILISATION

**i** L'ORTHOPUS Supporter doit être allumé **sans** bras installé dans l'orthèse et sans toucher à la télécommande.

**i** Avant de retirer le bras de l'utilisateur du support, **vérifiez toujours** que l'ORTHOPUS Supporter est en mode FIXE ou en VEILLE.

**i** Il est conseillé d'**utiliser le dispositif de manière progressive** et d'être suivi par un professionnel de santé.

**i** Seule **une personne formée** est habilitée à installer le dispositif.

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de l'ORTHOPUS Supporter, **veillez à ce que :**

**✓** En position horizontale, le bras ne penche ni en avant ni en arrière.

**✓** Le bras soit toujours en contact avec le support de coude. Si nécessaire, enregistrez une limite en hauteur.

**✓** En utilisation sur fauteuil, les câbles et le boîtier d'alimentation soient bien rangés à l'arrière et à l'abri de la pluie.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

**⚠** Vous devez **prendre connaissance du manuel complet d'utilisation du dispositif** [orthopus.com/fr/documentation](http://orthopus.com/fr/documentation)

**⊖** Ne pas appliquer de force excessive sur l'appareil. Par exemple, ne pas s'appuyer sur l'appareil. **L'ORTHOPUS Supporter est uniquement destiné à soutenir le bras.**

**⊖** En cas de défauts ou dommages sur les éléments électroniques, n'utilisez pas l'appareil. **Contactez votre installateur de matériel médical** pour tout problème de maintenance.

**⊖** **Ne modifiez aucune partie de cet équipement** sous peine d'entraîner une perte de la garantie.

**⚠** Le dispositif est résistant aux projections d'eau mais n'est **pas étanche**. Ne pas l'exposer à une pluie soutenue, une forte humidité ambiante ou une chute de neige.



L'ORTHOPUS Supporter doit toujours **être rangé dans son carton d'emballage** lorsqu'il n'est pas installé. Cet emballage devra être utilisé en cas de renvoi du dispositif.



*Guide d'utilisation rapide de  
l'ORTHOPUS Supporter  
v1.2 - 2025/03/04*