


# ORTHOPUS SUPPORTER

## KURZANLEITUNG

### FARBEN DES KNOPFES AUF DER RÜCKSEITE

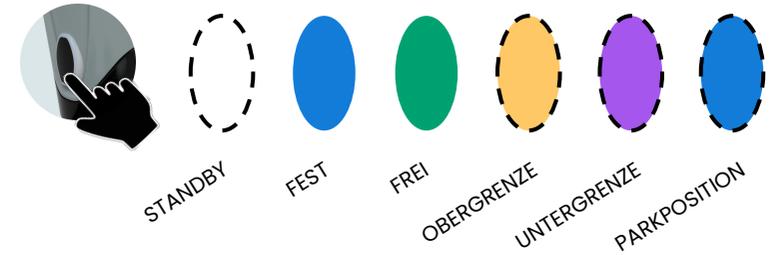

Anleitungsvideos



**FESTER MODUS = BLAU**  
Fixiert eine gewünschte Höhe

- **Runter**    **Hoch** +

**SPEICHERUNG DER OBER- ODER UNTERGRENZEN**

**1 LANGER KLICK** → **1** → Einstellung einer **Obergrenze** → **2** → Einstellung einer **Untergrenze** → **3** → Rückkehr in den **FESTEN** Modus

↓

Die Ausstattung mit der Fernbedienung in die gewünschte Position bringen

Zum **SPEICHERN**: **1 LANGER KLICK**  
Lange Vibration = **OK**

**OHNE Speicherung** fortfahren:  
**1 KURZER KLICK**



**LANGER KLICK** auf die beiden Tasten der Fernbedienung

ODER



**1 KURZER KLICK** auf den hinteren Knopf  
Kurze vibration = **OK**



**FREIER MODUS = GRÜN**  
Begleitet die Bewegungen

- **-100g /klick**    **+100g /klick** +

**SPEICHERUNG EINER UNTERSTÜTZENDEN KRAFT**

**1 LANGER KLICK** auf den hinteren Knopf  
Kurze vibration = **OK**

### STANDBY

= WEISS BLINKEND

**2 KURZE KLICKS** auf den hinteren Knopf, um in den STANDBY-Modus zurückzukehren

## PARKPOSITION BEI EINEM ROLLSTUHL

Fahren Sie im **FESTEN Modus** solange runter, bis der ORTHOPUS Supporter auf die Armlehne drückt und blockiert.



### Blaues Blinken

des hinteren Knopfes

Aktivierte Parkposition = **OK**

Zum Verlassen der Parkposition drücken Sie die Taste **+** auf der Fernbedienung.

## WARTEN AUF DEN FREIEN MODUS



### Grünes Blinken

des hinteren Knopfes

Im **FREIEN Modus**, wenn sich kein Arm in der Orthese befindet, wechselt der ORTHOPUS Supporter in die Sicherheitsstellung.

## FEHLERMODUS



### Klemmen Sie die Ausstattung ab,

warten Sie einige Minuten und schalten Sie sie erneut ein.

Bleibt der hintere Knopf rot, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur medizinischer Geräte.

## NUTZUNGSHINWEISE

**i** Der ORTHOPUS Supporter muss eingeschaltet werden, **ohne** dass sich der Arm in der Orthese befindet und ohne Betätigung der Fernbedienung.

**i** Vor dem Entfernen des Arms des Nutzers aus der Ausstattung müssen Sie **immer sicherstellen**, dass sich der ORTHOPUS Supporter im Modus FEST oder STANDBY befindet.

**i** Es wird empfohlen, die **Ausstattung schrittweise einzusetzen** und sich von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft betreuen zu lassen.

**i** Nur **eine geschulte Person** darf die Ausstattung einrichten.

Zur uneingeschränkten Nutzung der Funktionen des ORTHOPUS Supporter sollten Sie **auf Folgendes achten**:

✓ In der horizontalen Position ist der Arm weder nach vorne noch nach hinten geneigt.

✓ Der Arm ist stets mit der Ellbogenstütze in Kontakt. Speichern Sie bei Bedarf eine Höhenbeschränkung.

✓ Bei der Verwendung mit einem Rollstuhl müssen die Kabel und das Netzteil sorgfältig auf der Rückseite und vor Regen geschützt aufbewahrt werden.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

**!** Lesen Sie unbedingt das vollständige Benutzerhandbuch des Geräts: **[orthopus.com/documentation](https://orthopus.com/documentation)**

⊖ Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf das Gerät an. Lehnen Sie sich beispielsweise nicht darauf. Der ORTHOPUS Supporter ist **ausschließlich dazu bestimmt, den Arm zu stützen**.

⊖ Bei Defekten oder Schäden an elektronischen Komponenten darf das Gerät nicht verwendet werden. **Wenden Sie sich bei Wartungsproblemen an Ihren medizinischen Fachhändler.**

⊖ Verändern Sie keine Teile dieses Geräts, da dies zum Verlust der Garantie führen kann.

**!** Das Gerät ist spritzwassergeschützt, aber nicht **wasserdicht**. Setzen Sie es keinem starken Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Schneefall aus.



Wenn der ORTHOPUS Supporter nicht verwendet wird, muss er stets **in seinem Verpackungskarton aufbewahrt werden**. Diese Verpackung muss im Falle einer Rücksendung der Ausstattung verwendet werden.



Kurzanleitung für den ORTHOPUS Supporter  
**v1.2 - 2025/03/04**