


ORTHOPUS SUPPORTER

SNELLE GEBRUIKSAANWIJZING

KLEUREN VAN DE ACHTERSTE KNOP

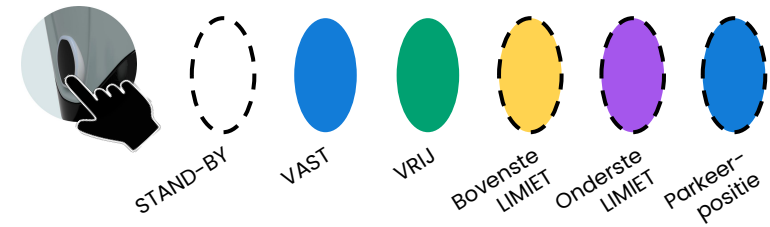

Instructievideo's



VASTE MODUS = BLAUW
Stabiliseert een gekozen hoogte

- Omlaag + Omhoog

DE HOGE OF LAGE LIMIET OPSLAAN

1 LANGE KLIK → Een **hoge** limiet instellen → 2 → Een **lage** limiet instellen → 3 → Terug naar modus **VAST**

↓

Plaats het hulpmiddel in de gewenste positie met de afstandsbediening

Voor **OPSLAAN**, 1 LANGE KLIK
Lange trilling = OK

Doorgaan **ZONDER opslaan**, 1 KORTE KLIK

STAND-BY = WIT KNIPPEREND

2 KORTE KLIKKEN op de achterste knop om terug te keren in de modus STAND-BY

CHANGER DE MODE

LANG KLIKKEN op de 2 knoppen van de afstandsbediening
OF
1 KORTE KLIK op de achterste knop
OK Korte trilling = OK

MODUS VRIJ = GROEN
Begeleiden van de bewegingen

-100g /klic +100g /klic

EEN ONDERSTEUNINGSKRACHT INSTELLEN

1 LANGE KLIK op de achterste knop
Korte trilling = OK

PARKEERPOSITIE OP STOEL

Breng in de **modus VAST** omlaag totdat de ORTHOPUS Supporter op de armsteun rust en wordt geblokkeerd.



Blauw knippen

van de achterste knop

Parkeerpositie geactiveerd = **OK**

Om uit de Parkeerpositie te komen, drukt u op de knop **+** van de afstandsbediening.

WACHTEN IN VRIJE MODUS



Groen knippen

van de achterste knop

Als er in de modus VRIJ geen arm in de orthese is geplaatst, wordt de ORTHOPUS Supporter in de veiligheidsstand gezet.

FOUTMODUS



Koppel het hulpmiddel los, wacht een aantal minuten en zet het dan weer aan.

Als de achterste knop rood blijft, neemt u contact op met de installateur van medische hulpmiddelen.

GEBRUIKSTIPS

i De ORTHOPUS Supporter moet worden aangesloten **zonder** dat er een arm in de orthese is geplaatst en zonder de afstandsbediening aan te raken.

i Voor het verwijderen van de arm van de gebruiker uit het hulpmiddel, **altijd controleren** of de ORTHOPUS Supporter in de modus VAST of STAND-BY staat.

i Het wordt aangeraden om **het hulpmiddel steeds iets langer te gebruiken** en te worden bijgestaan door een gekwalificeerde zorgverlener.

i Het hulpmiddel mag alleen worden geïnstalleerd door een **opgeleide persoon**.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de functies van de ORTHOPUS Supporter, **ervoor zorgen dat:**

✓ De arm in horizontale positie niet naar voren of naar achteren leunt.

✓ De arm altijd in contact is met de elleboogsteun. Indien nodig, een hoogtelimiet instellen.

✓ Bij gebruik op een stoel, de kabels en de voedingskast achterop en beschermd tegen regen zijn opbergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

⚠ U moet de volledige gebruikershandleiding van het apparaat raadplegen:
orthopus.com/documentation

⊖ Oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Leun bijvoorbeeld niet op het apparaat. De ORTHOPUS Supporter is **uitsluitend bedoeld om de arm te ondersteunen**.

⊖ Gebruik het apparaat niet als er defecten of schade zijn aan de elektronische onderdelen. **Neem contact op met uw leverancier van medische apparatuur** voor onderhoudsproblemen.

⊖ **Wijzig geen enkel onderdeel van dit apparaat**, anders vervalt de garantie.

⚠ Het apparaat is bestand tegen waterspatten, maar is **niet waterdicht**. Stel het niet bloot aan hevige regen, hoge luchtvochtigheid of sneeuwval.



De ORTHOPUS Supporter moet altijd worden **opgeborgen in zijn verpakkingsdoos** als hij niet geïnstalleerd is. Deze verpakking moet worden gebruikt voor het terugsturen van het hulpmiddel.



Snelle gebruiksaanwijzing van de ORTHOPUS Supporter
v1.2 - 2025/03/04