


ORTHOPUS SUPPORTER

HURTIGGUIDE

BAKKNAPP FARGER

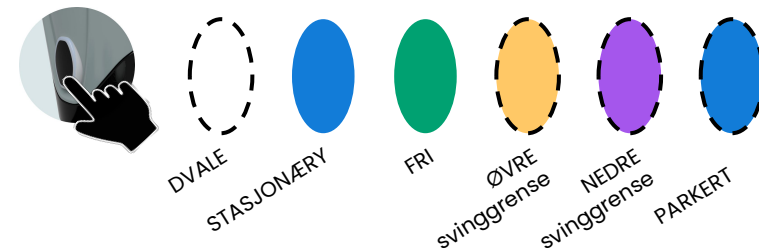

Instruksjonsvideoer



DVALE MODUS
= BLINKENDE HVIT

2 KORTE KLIKK
på bakkappen for
å gå tilbake til
DVALE modus

SKIFTE MODUS

1 LANGT KLIKK på begge
knapper på
kontrollpanelet
ELLER
1 KORT KLIKK på
bakkappen
Kort vibrasjon = OK

FRI MODUS = GRØNN
Blir med på bevegelsene

- **-100g /klikk** + **+100g /klikk**

SETTING SWING LIMITS



**1 LANGT
KLIKK**

1 → Sett **øvre**
svinggrense

2 → Sett **nedre**
svinggrense

3 → Tilbake i
STASJONÆR
modus

Posisjoner enheten der du ønsker å sette
grensen med kontrollpanelet.

For å **FASTSETTE**, **1 LANGT KLIKK**
Lang vibrasjon = OK

For å hoppe over **UTEN** å sette grenser, **1
KORT KLIKK**

JUSTER EN IDEELL KOMPENSASJONSKRAFT



1 LANGT KLIKK på bakkappen
Kort vibrasjon = OK

PARKERINGSPOSISJON PÅ RULLESTOL

I **STASJONÆR** modus, skyv ORTHOPUS Supporter ned på armlenet, og enheten blir værende i posisjonen.



Bakknappen
blinkende blå

Parkeringsposisjon aktivert = **OK**

For å forlate parkeringsposisjon, klikk på + knappen på kontrollpanelet.

VENTER I FRI MODUS



Bakknappen
blinker grønt

Hvis enheten settes i FRI modus uten armen i armortosen, vil enheten selv sette seg i sikkerhetsmodus.

FEILMODUS



KOBLE ENHETEN FRA STRØM, og vent noen minutter før du tar den i bruk igjen. Dersom varsellampen (rød) vedvarer, vennligst kontakt leverandør.

ANBEFALINGER

i Ved oppstart av ORTHOPUS Supporter, ikke rør kontrollpanelet og ikke legg armen i armortosen.

i Før brukerens arm fjernes fra støtten, tilse alltid at ORTHOPUS Supporter er i STASJONÆR eller DVALE modus.

i Det anbefales at brukeren **akklimatiseres til enheten gradvis**, og følges opp av kvalifisert helsepersonell i oppstartsperioden.

i Kun en **person med opplæring** er autorisert til å installere ORTHOPUS Supporter.

For å utnytte alle fordelene ORTHOPUS Supporter tilbyr, **vennligst tilse at:**

✓ Armen er i horisontal posisjon, og ikke heller fremover eller bakover.

✓ Armen alltid er i kontakt med albuestøtten. Hvis nødvendig, sett en øvre svinggrense.

✓ Ved innstallasjon på rullestol er kabel og boksgrensesnitt beskyttet fra regn og fukt.

VIKTIG INFORMASJON

⚠ Du må lese hele bruksanvisningen for enheten: orthopus.com/documentation

⊖ Ikke bruk overdreven kraft på enheten. For eksempel, ikke len deg på den. **ORTHOPUS Supporter er kun designet for å støtte armen.**

⊖ Ved feil eller skade på de elektroniske komponentene, må du ikke bruke enheten. **Kontakt din medisinske utstyrsleverandør for vedlikeholdsproblemer.**

⊖ **Ikke endre noen deler av dette utstyret**, da det kan føre til tap av garanti.

⚠ Enheten tåler vannsprut, men er **ikke vantett**. Ikke utsett den for kraftig regn, høy luftfuktighet eller snøfall.



Hvis ORTHOPUS Supporter ikke er montert, **må den oppgavares i originalforpakning og boks til enhver tid**. Ved retur må enheten returneres i originalforpakning.



ORTHOPUS Supporter Hurtigguide
v1.2 - 2025/03/04