


ORTHOPUS SUPPORTER

GUIDE DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

CORES DO BOTÃO TRASEIRO

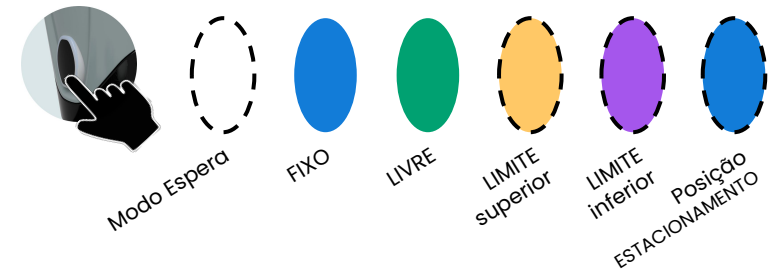

Vídeos
tutoriais



MODO FIXO = AZUL
Estabiliza uma altura escolhida

- +
descer subir

GRAVAR LIMITES SUPERIORES OU INFERIORES

1 CLIQUE LONGO

1 → Configurar um limite superior

2 → Configurar um limite inferior

3 → Voltar ao modo FIXO

Coloque o dispositivo na posição desejada com o comando

Para **GRAVAR**, 1 CLIQUE LONGO
Vibração longa = **OK**

Para passar **SEM gravar**, 1 CLIQUE CURTO



CLIQUE LONGO nos 2 botões do comando
OU
1 CLIQUE CURTO no botão traseiro
Vibração curta = **OK**



MODO LIVRE = VERDE
Acompanha os movimentos

- +
-100g /clique +100g /clique

GRAVAR UMA FORÇA DE APOIO

1 CLIQUE LONGO no botão traseiro
Vibração curta = **OK**

MODO ESPERA = BRANCO INTERMITENTE
2 CLIQUES CURTOS no botão traseiro para voltar ao modo espera

POSIÇÃO ESTACIONAMENTO NA CADEIRA

No **modo FIXO**, desça até que o ORTHOPUS Supporter pressione o apoio de braço e fique bloqueado.



Piscar azul do botão traseiro

Posição de estacionamento ativada = OK

Para sair da posição Estacionamento, pressione o botão **+** do comando.

A AGUARDAR NO MODO LIVRE



Piscar verde do botão traseiro

No modo LIVRE, se não houver um braço pousado na órtese, o ORTHOPUS Supporter entra em modo de segurança.

MODO DE ERRO



Desligue o dispositivo, aguarde alguns minutos e depois ligue-o novamente. Se o botão traseiro continuar vermelho, contacte o seu instalador de material médico.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

i O ORTHOPUS Supporter deve ser ligado **sem** o braço pousado na órtese e sem tocar no comando.

i Antes de retirar o braço do utilizador do suporte, **verifique sempre** que o ORTHOPUS Supporter está no modo FIXO ou em ESPERA.

i É aconselhável **utilizar o dispositivo de forma progressiva** e ser acompanhado por um profissional de saúde.

i Apenas **uma pessoa treinada** está habilitada a instalar o dispositivo.

Para tirar o máximo partido das funcionalidades do ORTHOPUS Supporter, **certifique-se de que:**

✓ Na posição horizontal, o braço não está inclinado nem para a frente nem para trás.

✓ O braço está sempre em contacto com o suporte de cotovelo. Se necessário, grave um limite de altura.

✓ Ao usar numa cadeira, os cabos e a caixa de alimentação estarem devidamente acondicionados na parte traseira e protegidos da chuva.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

⚠ Deve ler **atentamente o manual completo de utilização do dispositivo:** orthopus.com/documentation

⊖ Não aplique força excessiva no dispositivo. Por exemplo, não se apoie sobre ele. **O ORTHOPUS Supporter destina-se exclusivamente a apoiar o braço.**

⊖ Em caso de defeitos ou danos nos componentes eletrónicos, não utilize o dispositivo. **Contacte o seu instalador de material médico** para qualquer questão de manutenção.

⊖ **Não modifique nenhuma parte deste equipamento**, sob pena de perda da garantia.

⚠ O dispositivo é resistente a salpicos de água, mas **não é à prova de água**. Não o exponha a chuva intensa, elevada humidade ou neve.



O ORTHOPUS Supporter deve ser sempre **guardado na sua caixa de embalagem** quando não estiver instalado. Esta embalagem deve ser utilizada em caso de devolução do dispositivo.



Guia de utilização rápida do ORTHOPUS Supporter
v1.2 - 2025/03/04