



La position **du support du bras et du coude est essentielle** pour assurer le bon fonctionnement du dispositif ORTHOPUS.

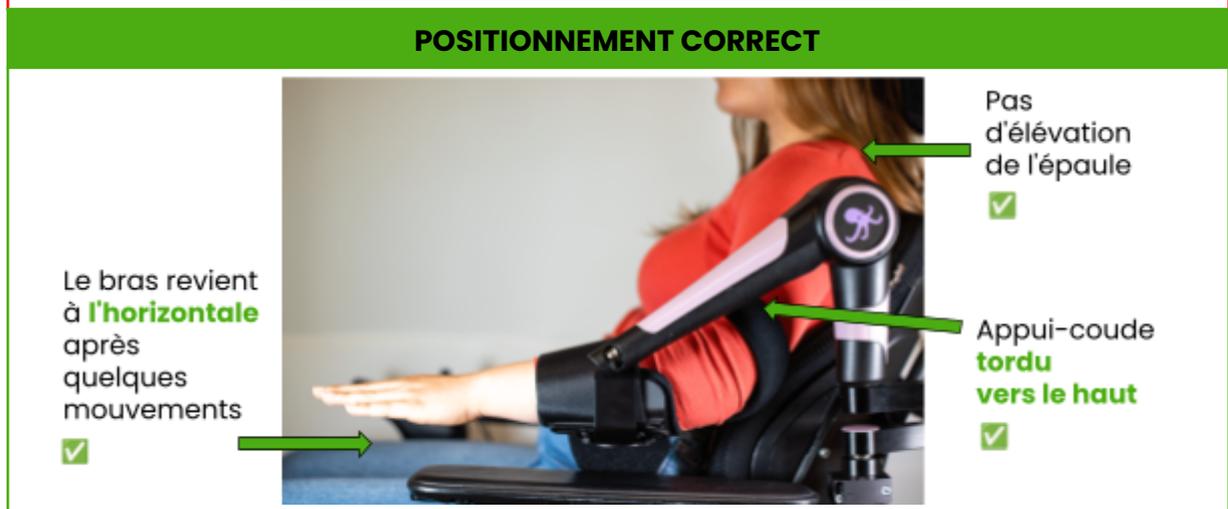

FIXER LA POSITION DU SUPPORT DE BRAS ET DE COUDE

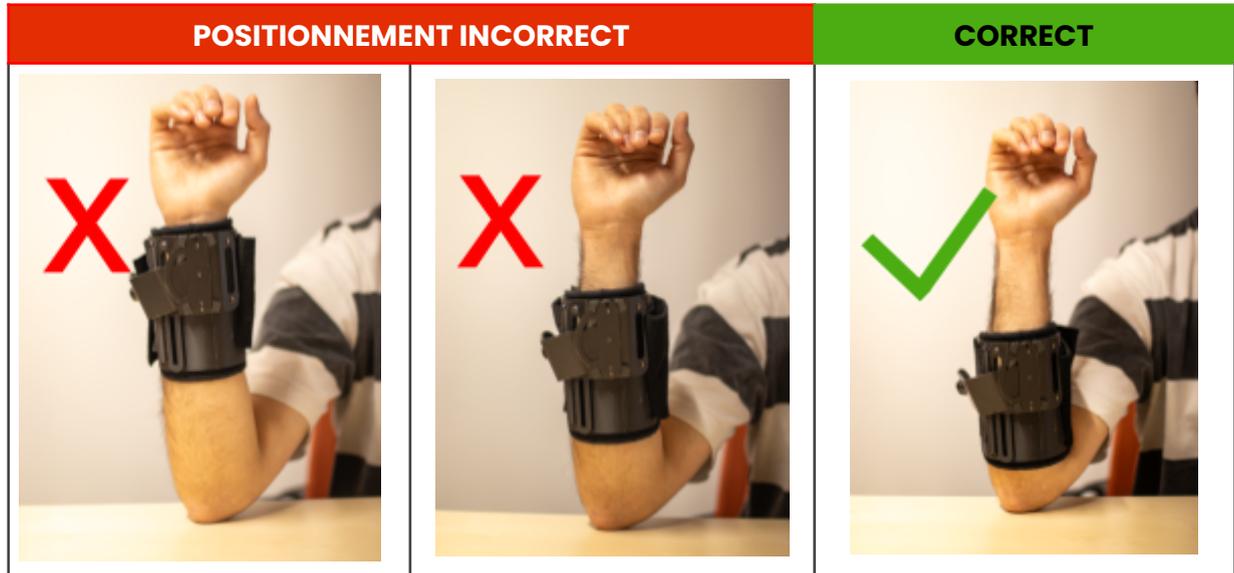

2 vis externes

→ pour mettre en place le support de bras



2 vis internes

→ pour mettre en place le support de coude

AJUSTER LA POSITION DU SUPPORT DE COUDE



Tordez le support de coude pour pouvoir le pousser vers le haut. La partie plate doit être pleinement en contact avec le bras.



Sentez vous libre d'enlever le bras de l'utilisateur.rice de l'orthèse pour pouvoir le faire plus facilement.



Toutes les informations détaillées sur l'orthèse ORTHOPUS (4 tailles et ajustements) dans les instructions d'utilisation dans le carton ou sur orthopus.com/fr/documentation-orthopus



Scannez ce QR code pour voir notre vidéo **TUTORIEL - Installation et réglages de l'orthèse** (7min)