

Die Position der **Armschale und der Ellbogenstütze ist entscheidend** für um eine gute Funktion des ORTHOPUS-Gerätes zu gewährleisten



POSITIONIERUNG DER ARMSCHALE UND DER ELLBOGENSTÜTZE



2 äußere Schrauben

→ zum Einstellen der Position der Armschale



2 Innenschrauben

→ zum Einrichten der Position der Ellbogenstütze

EINSTELLEN DER POSITIONIERUNG DER ELLBOGENSTÜTZE



Drehen Sie die Ellenbogenstütze, um sie **nach oben** zu drücken. Der flache Teil muss **in vollem Kontakt** mit dem Arm sein.



Um dies zu erleichtern, können Sie den Arm des Benutzers aus der Armstütze nehmen.



Alle **detaillierten Informationen zur ORTHOPUS-Armschiene (4 Größen, Einstellungen)** finden Sie in der Gebrauchsanweisung in der ORTHOPUS-Verpackung oder auf [orthopus.com/documentation](https://www.orthopus.com/documentation)



Scannen Sie diesen QR-Code, um unser Video anzusehen
TUTORIAL - Installation and adjustment of the arm brace
(7min)