


De positie van zowel de **armschaal** als de **elleboogsteun** is van **vitaal** belang voor een goede werking van het ORTHOPUS-apparaat.

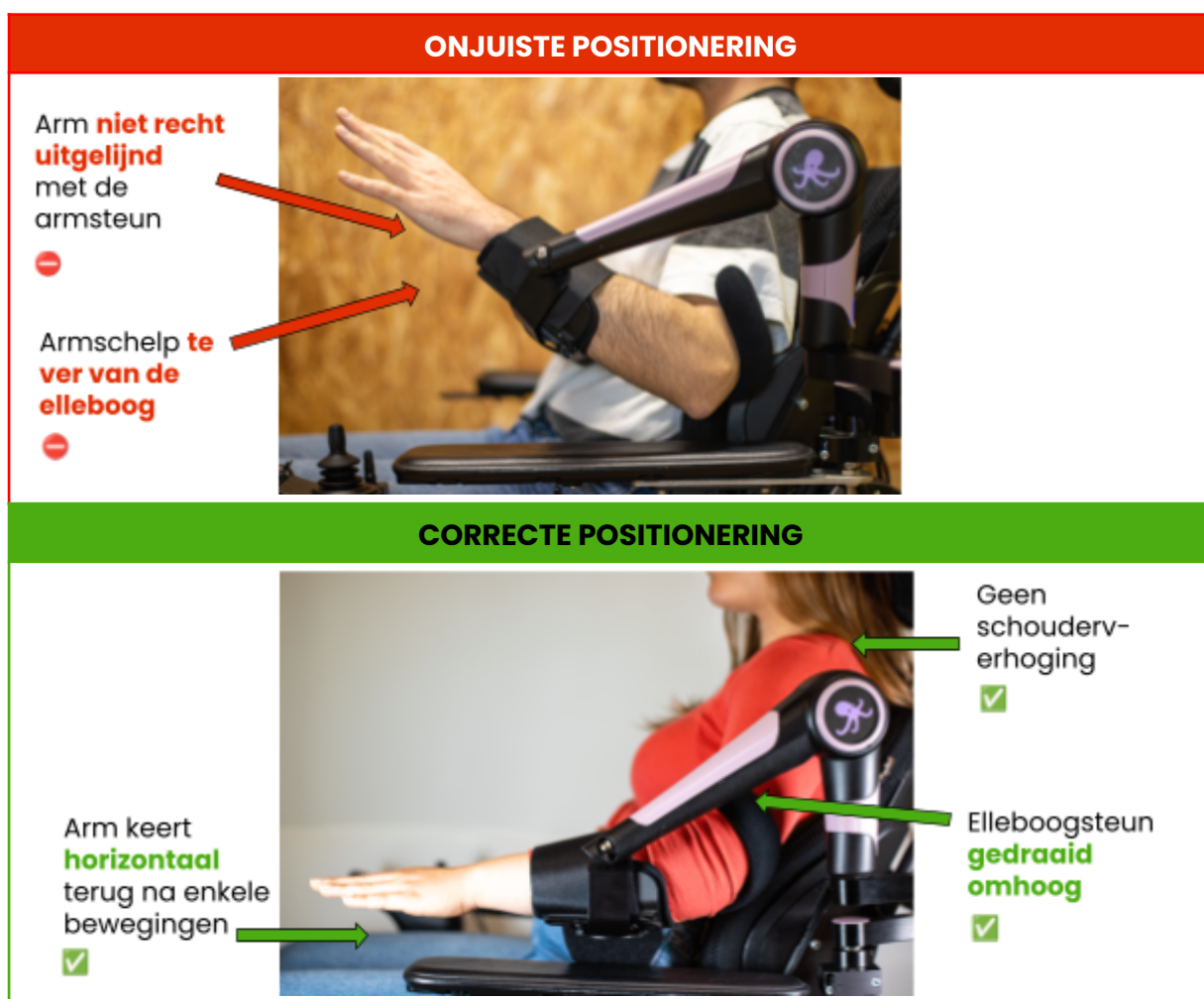

BEVESTIG DE POSITIE VAN DE ARMSCHAAL EN ELLEBOOGSTEUN



2 buitenste schroeven

→ om de positie van de armschaal in te stellen



2 binnenschroeven

→ om de positie van de elleboogsteun in te stellen

DE POSITIE VAN DE ELLEBOOGSTEUN AANPASSEN



Draai de elleboogsteun om hem **omhoog** te duwen. Het platte deel moet **volledig contact** maken met de arm.



Voel je vrij om de arm van de gebruiker uit de armbrace te halen om dit gemakkelijker te doen.



Alle **gedetailleerde informatie over de ORTHOPUS-armbandage (4 maten, aanpassingen)** vindt u in de gebruiksaanwijzing in de ORTHOPUS-verpakking of op orthopus.com/en/documentation



Scan deze QR-code om onze video te bekijken **TUTORIAL - Installation and adjustment of the arm brace** (7min)