



Plasseringen av både **armskallet og albuestøtten er avgjørende** for
for å sikre at ORTHOPUS-enheten fungerer godt.

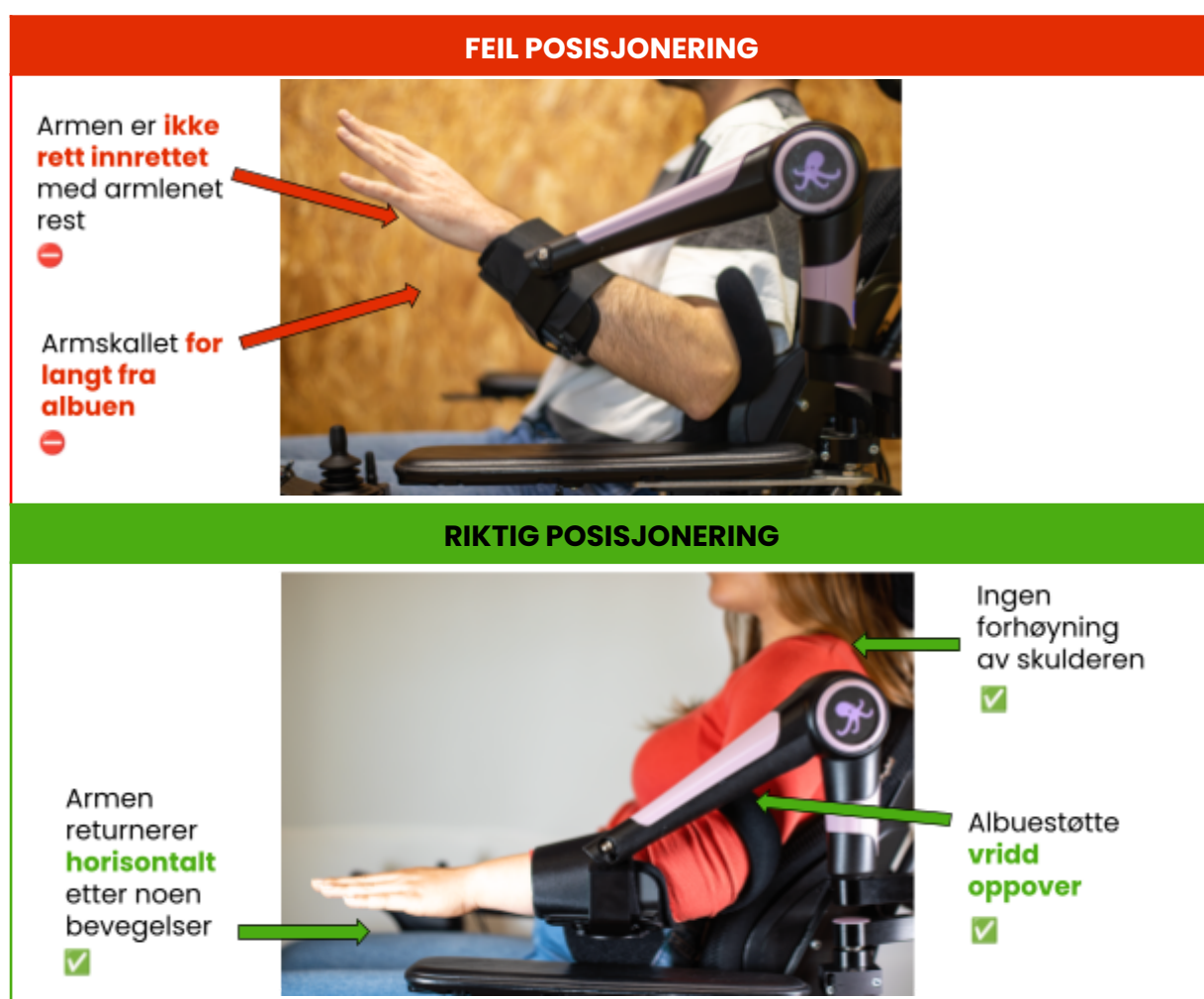

FIKSE ARMSKALLETS OG ALBUESTØTTENS POSISJONERING

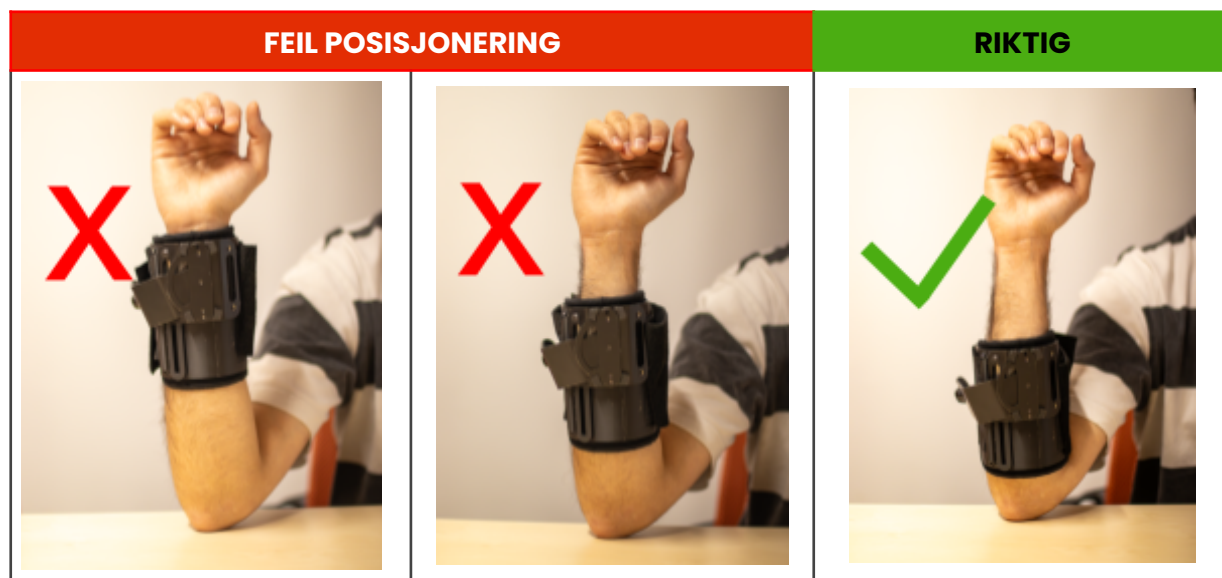

2 ytre skruer

→ for å sette opp armskallets posisjon



2 innvendige skruer

→ for å sette opp albuestøtteposisjonen

JUSTER ALBUESTØTTENS POSISJONERING



Vri albuestøtten for å skyve den **oppover**. Den flate delen må være i **full kontakt** med armen.



Fjern gjerne brukerens arm fra armstøtten for å gjøre dette enklere



Du **finner all detaljert informasjon om ORTHOPUS' armskinne (4 størrelser, justeringer)** i bruksanvisningen i ORTHOPUS-emballasjen eller på orthopus.com/documentation



Skann denne QR-koden for å se videoen vår **TUTORIAL – Installation and adjustment of the arm brace** (7min)